



MANUAL (KURZFORM)

FINGER-PULSOXIMETER MD300C3

INSTRUKTION ZUM GEBRAUCH

- 2 AAA-Batterien einlegen
- Sicherungsschnur, falls erwünscht, anbringen.
- Pulsoximeter leicht öffnen (wie Wäscheklammer) und Fingerspitze mit Nagel nach oben (= Bildschirmseite) einführen. Knopf (ein/aus) drücken, nach einigen Sekunden erscheinen die Werte für SpO2 und Puls.
- Durch kurzes Drücken des Knopfs lassen sich 7 Anzeigeformen einstellen.
- Durch langes Drücken des Knopfs (>1s) lassen sich 10 Helligkeitsstufen einstellen. Standard ist die Helligkeitsstufe 4.

EINSATZBEREICH

- Bei Herz- und/oder Lungenkrankheiten.
- In Medizinische Anlaufstellen wie Apotheken, Arztpraxen und Kliniken.
- Höhenbergsteigerinnen und -bergsteiger.
- Sportlerinnen und Sportler mit maximalen Herz-Lungenleistungen.

SPEZIFIKATIONEN

- | | |
|---|---------------|
| • Bildschirm | LCD |
| • Gewicht (inklusive 2 AAA-Batterien) in g | 50 |
| • Masse in mm: | 60 x 34 x 30 |
| • Stromverbrauch | <40 mA |
| • Batterien 2 AAA | 1.5 V 600 mAh |
| damit erreichbare Betriebsdauer | 30 h |
| • Anzeigemodi | 7 |
| • Alarm, audiovisuell bei SpO2 <90% und/oder Puls <60/min oder >100/min | |

BEI FEHLFUNKTION

- Fingerposition prüfen und neu einpassen, Finger wechseln.
- An anderer Person messen.
- Batterien wechseln.
- Bei Importeur nachfragen (Garantie 2 Jahre).